



上

297mm

サージカルマスク簡易フェイスガード作成手順

材料：A4サイズの厚さ100～150 μ mの透明ラミネートフィルムなど

この型紙をA4サイズに合わせて印刷（必要に応じて拡大して調整する）


フィルムの下に型紙を合わせ、上方中央と右中央にマスキングテープなどで固定
丸型*をエンジンラウンドバーなどで4カ所開ける、丸型を繋ぐようにカッターでカットして完成
10枚程度であればまとめてエンジンラウンドバーなどで4カ所空けると量産効率は向上する
（*丸型は省略可だが多少ずれやすくなる）

最初に使用するサージカルマスクを顔に一度フィットさせる。

フィットさせたサージカルマスク耳掛けゴムを左右カット面に通す

ゴムを丸型に入れると装着後ずれ難い：①

フェイスガード付きマスクを装着し再度マスクをフィッティング：②

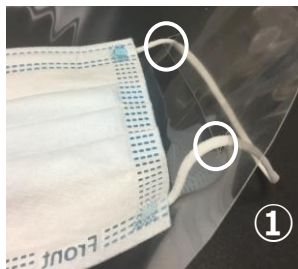

下

210mm

